


广告

Agilent
Dako

Dako CoverStainer H&E 染色方案

安捷伦病理学解决方案

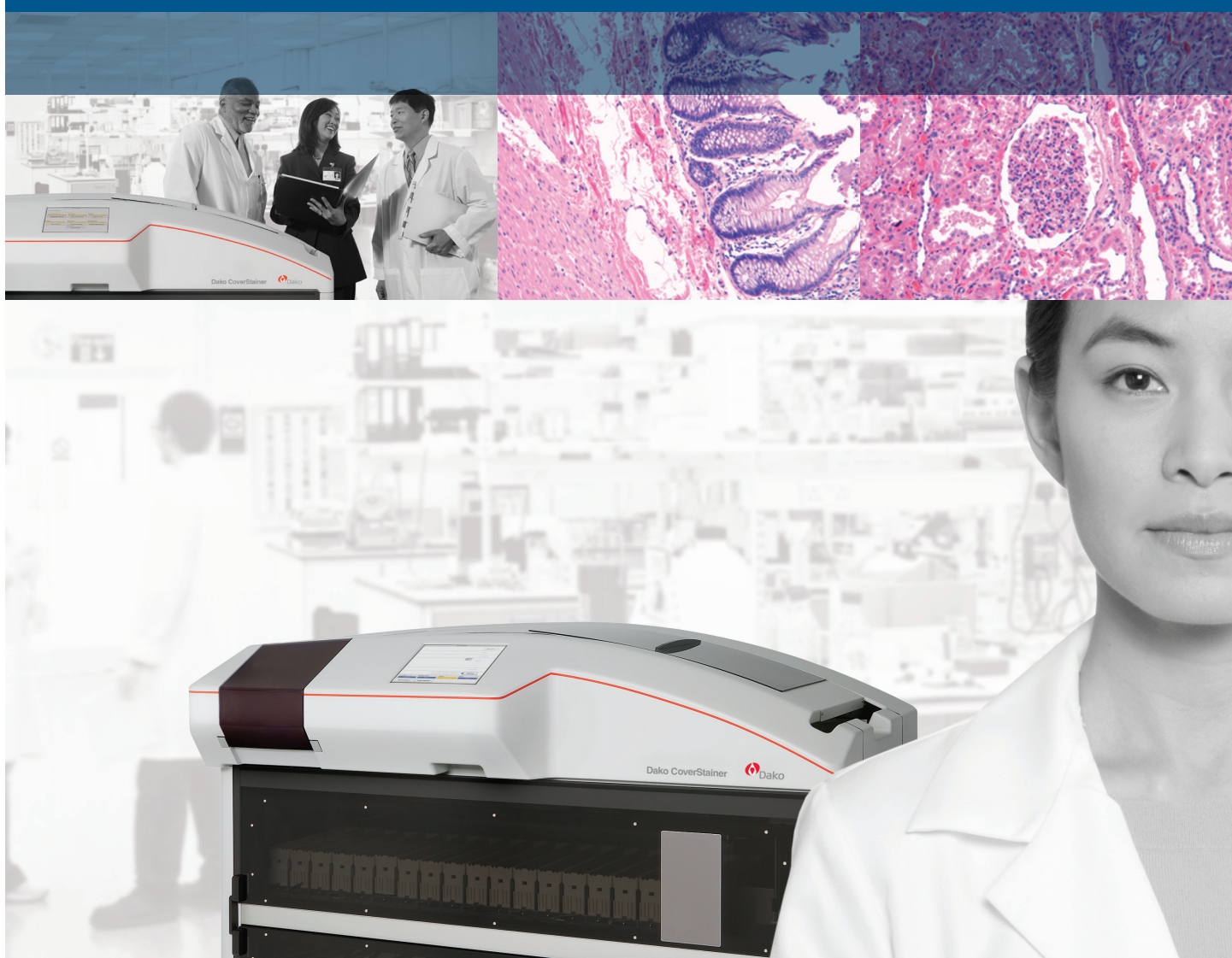

产品名称：组织染色机

产品备案号：国械备 20140300

广告审批号：京械广审(文)第 270701-22730 号


禁忌内容或者注意事项详见说明书。



Agilent

Trusted Answers

CoverStainer 组织染色机

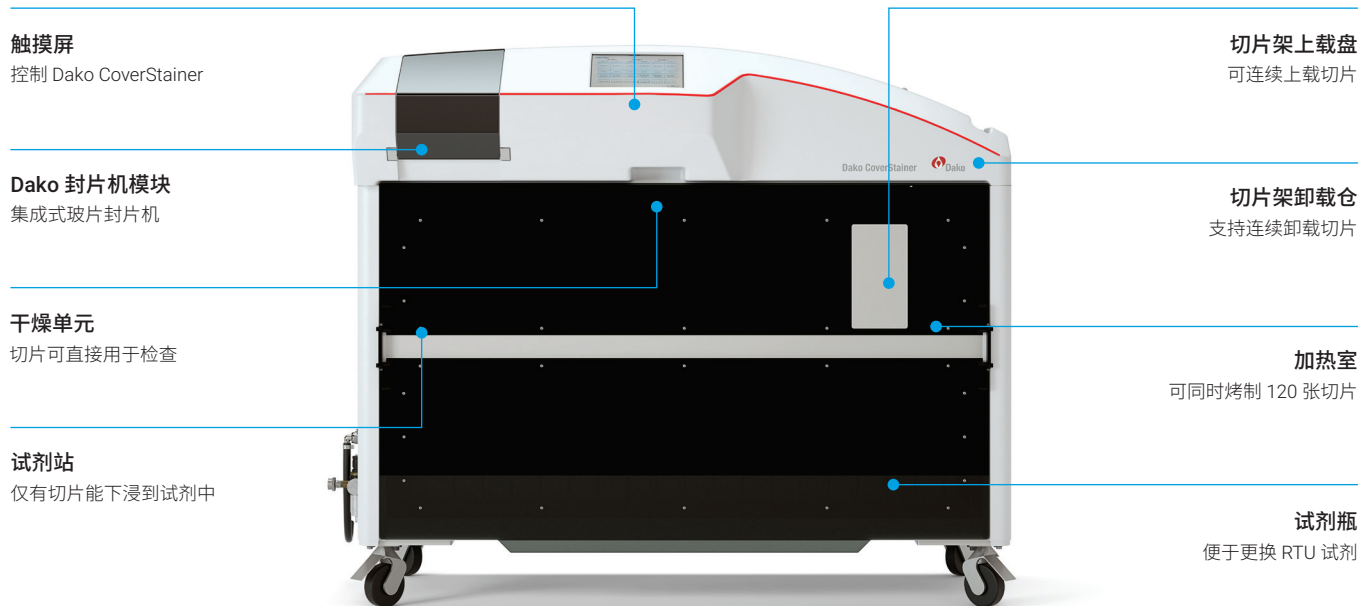

触摸屏
控制 Dako CoverStainer

切片架上载盘
可连续上载切片

Dako 封片机模块
集成式玻片封片机

切片架卸载仓
支持连续卸载切片

干燥单元
切片可直接用于检查

加热室
可同时烤制 120 张切片

试剂站
仅有切片能下浸到试剂中

试剂瓶
便于更换 RTU 试剂

全自动 H&E 染色的选择

CoverStainer — 实现全自动 H&E 染色

CoverStainer 对从烤片到干燥的每一个步骤都实现了自动化。其可依据客户需求，合理利用资源。


CoverStainer 与即用型 (RTU) 试剂 (安捷伦预优化方案) 配合使用，共同构建了一套自动化智能试剂处理系统。




安捷伦即用型试剂

安捷伦即用试剂与 CoverStainer 和安捷伦已验证方案配合使用，有助于节省手动操作过程并简化工作流程。

- 易于使用的预填充试剂盒可避免溢出
- 密闭容器中的储存可避免试剂挥发，延长使用期限

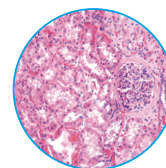

CoverStainer 实现从第 1 至第 3000 片 (或第 1 至第 5 天) 染色一致。

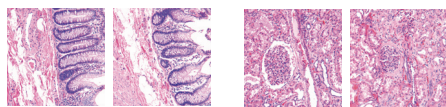

结肠切片 1 号; 第 1 天 结肠切片 3001 号; 第 5 天 肾脏切片 1 号; 第 1 天 肾脏切片 3001 号; 第 5 天



安捷伦预设方案

经过安捷伦预实验预设的方案

- 可解放对操作人员的依赖性
- 采用相同试剂的四种不同方案可同时运行



CoverStainer 解决方案可以实现从切片到显微整个常规染色过程的自动化。从而节省周转时间。CoverStainer 能够过夜运行。



通过定制染色方案满足实验室的需求，可同时运行多个方案。



Dako CoverStainer



CoverStainer — 性能参数

参数	说明
集成式烤	120 张切片，12 个切片架（每个切片架 10 张切片），温度为 50-70 °C (122-158 °F)
过夜运行功能	120 张切片在出口槽中
试剂站	36 个试剂站：18 个液槽（每个液槽 2 个试剂站）
软件方案	标准化 Dako 已验证方案 19 个程序用于定制方案，每个切片架一个方案 可同时运行四个个性化方案
废弃试剂容量	两个独立的废液容器（每个 10 L）

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本文中的信息、说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2023
2023年8月，中国出版

